

MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

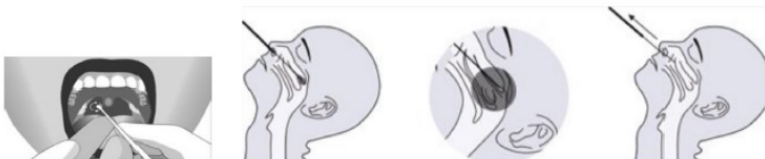


Abbildung 1: Rachen- oder Nasenabstrich durch medizinisches Fachpersonal



Abbildung 2: Extraktionspuffer einfüllen

Abbildung 3: Probe durch Rotation im Extraktionspuffer lösen

Abbildung 4: Dosierkappe für genaue Dosierung aufsetzen

Abbildung 5: 2 Tropfen auftragen

Abbildung 6: Ergebnis kann nach 15-20 Minuten abgelesen werden


Einfache Ergebniskontrolle

Ein validiertes Ergebnis erfordert die Abbildung der Kontrolllinie „C“.

Positiv ist das Ergebnis sobald sich die Testlinie „T“ färbt.

Negativ ist das Ergebnis, sofern sich keine Bande für die Testlinie „C“ bildet.

Ungültig ist das Ergebnis ohne Kontrolllinie „C“.

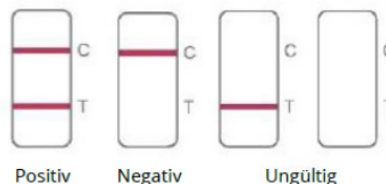

MEDsan <small>biological health solutions</small>		RT PCR		
		Positiv	Negativ	Total
MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	Positiv	111	1	112
	Negativ	9	499	508
	Total	120	500	620
Sensitivität	92,5 % (95 % CI: 86,4 %, 96,0 %)			
Spezifität	99,8 % (95 % CI: 98,9 %, 100%)			
Genauigkeit	96,4 %, (95 % CI: 97,1 %, 99,1 %)			